


Anleitung: Kunden-Logo auf Befundbogen drucken


- 1) Bearbeiten Sie Ihr Logo: 1 bit (indiziert s/w), Grösse: 704 x 108 px und speichern Sie es unter dem Namen **logo.bmp** auf dem InBody-USB-Stick ab.
- 2) Laden Sie das Logo auf das In-Body-Gerät:
Stecken Sie den USB-Stick in das Gerät und schalten Sie dieses ein.



Klicken Sie auf das „Administrator Menü“

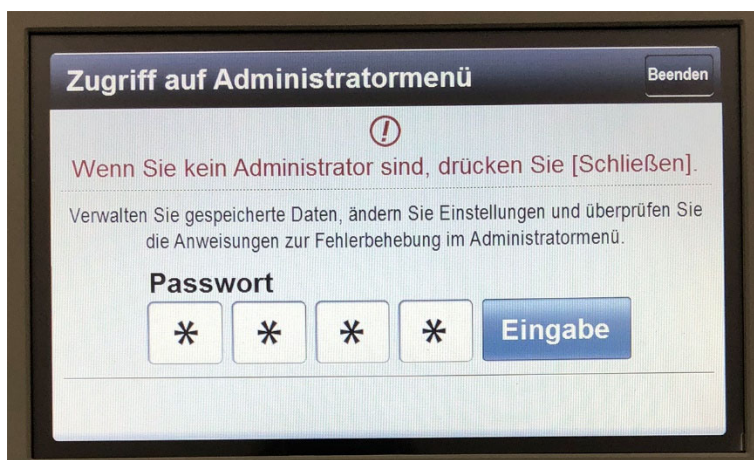

Geben Sie das Passwort 0000 ein

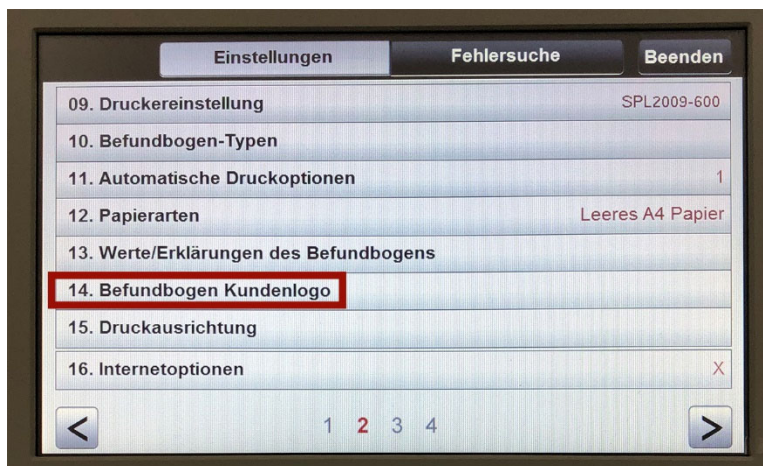

Klicken Sie auf Punkt 14
„Befundbogen Kundenlogo“



Wählen Sie „Bild“ an
und klicken Sie oben rechts auf „Beenden“

Haben Sie Probleme mit dem Upload Ihres Firmen-Logos?
Kontaktieren Sie uns per Tel. 044 500 31 80

best  health

Exklusiver Vertrieb Schweiz
best4health gmbh | Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf
www.best4health.ch