

Manuel – Fiche de résultat avec logo personnalisé

- 1) Editez votre logo: 1 bit (indexé n/b), taille: 704 x 108 px et enregistrez-le sous le nom logo.bmp sur la clé USB InBody.
- 2) Téléchargez le logo sur l'appareil INBODY: Eteignez l'appareil, insérez la clé USB dans l'appareil et rallumez-le.



Cliquez sur "Menu administrateur".



Entrez le mot de passe 0000.

Réglages	Dépannage Quitter
09. Configuration de l'imprimante	SPL2009-60
10. Types de fiches de résultat	
11. Options d'impression Automatiq	ue
12. Types de papier	Papier InBod
13. Données/Interprétations pour Fiche de Ré	sultat
14. Fiche de résultat avec logo pers	onnalisé
15. Alignement d'impression	
16. Options d'Internet	Wi-Fi (sans fil
< 1 2	3 4

Cliquez sur le point 14 "Fiche de résultat avec logo personnalisé"

Sélectionnez le type de logo.	
Texte	
Image	
Aperçu du Logo personnalisé	
InBody	

Sélectionnez "Image" et cliquez sur "Quitter" en haut à droit.

Avez-vous des problèmes avec votre logo sur le feuille de résultat? Contactez-nous par téléphone au 044 500 31 80.



Distribution Exclusive Suisse best4health gmbh | Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf www.best4health.ch